

PARAFINERO TERABATH

6 LIBRAS

Características técnicas:

- Capacidad estándar: 6 libras
- Tanque de aluminio
- Potencia: 100 – 125 V, 0.87 – 1.35 A, 50 – 60 Hz
- Temperatura de trabajo: 52.2 a 56.7 °C
- Tiempo de fusión: 6 a 8 horas
- Dimensiones:
 - o Interior: 28.96 x 17.15 x 14.73 cm (Largo x Ancho x Alto)
 - o Exterior: 36.32 x 20.83 x 19.1 cm (Largo x Ancho x Alto)




Accesorios estándar:



Bolsas de 1 libra de parafina (6)



Rejilla de plástico blanca (1)

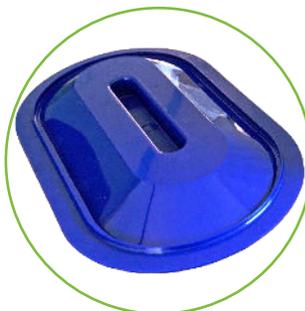

Tapa con asa integrada (1)



Cable de alimentación (1)

Precauciones:

- No verter agua u otros líquidos en la unidad.
- No opere la unidad sin la rejilla de plástico en la parte inferior.
- No toque el fondo o los lados del tanque de metal, ya que esto podría causar quemaduras.
- No caliente la parafina en una estufa, placa calefactora o microondas.
- Utilice este aparato en una superficie nivelada y segura.
- No utilice ningún aditivo en la parafina excepto según lo permita el fabricante.
- Antes de cada terapia, verifique cuidadosamente el dispositivo y sus accesorios para identificar cualquier daño mecánico, funcional u otro.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una red de suministro con tierra de protección.

Precauciones:

- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía de este.
- Evitar el uso de accesorios o insumos ajenos a los suministrados por la empresa FISIOLAB.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores.
- Evite exponer el dispositivo al contacto con agua, exceso de polvo o la humedad.
- Evite utilizar el dispositivo en espacios en donde estén presentes gases comburentes inflamables o vapores inflamables.

