

## SHOCKWAVE GO

DISPOSITIVO DE ONDAS DE CHOQUE PORTÁTIL INALÁMBRICA:  
SW2300 PORTÁTIL.

### Datos técnicos:

- 4 niveles de energía ajustables (60, 100, 145 y 185 mJ o 60, 70, 80 y 90 mJ)
- 2 frecuencias fijas de 5 y 10 Hz
- 2 programas de frecuencia de barrido dinámico (de 1 a 10 Hz y de 11 a 22 Hz)
- Frecuencia: 1 – 22 Hz
- Energía de salida: 60 – 185 Mj
- Dimensiones
  - o 266 x 117 x 57 mm

Las medidas pueden variar  $\pm 1$  mm.

- Peso: 1.1 Kg
- Batería: 1000 mAh 14.8 V
- Duración: hasta 10,000 disparos (con 100% de carga)

### Accesorios estándar:

- Aplicador SR15 (1 pza)
- Aplicador CR20 (1 pza)
- Aplicador CR15 (1 pza)
- Bolsa de transporte (1 pza)
- Aplicador de carga (1 pza)
- Paquete de baterías (1 pza)
- Herramienta de extracción del aplicador (1 pza)
- Anillo (Ø9.5 - Ø13.5 mm) (10 pzas)
- Anillo (Ø15 - Ø19 mm) (10 pzas)
- Anillo (Ø20 - Ø24 mm) (10 pzas)
- Manual de usuario USB (1 pza)

### Accesorios opcionales:

- Aplicador CD15
- Aplicador CD20
- Aplicador CD35
- Aplicador SR20
- Aplicador SR35
- Aplicador CR35
- Anillo (Ø35 – Ø39 mm)



## Precauciones:

- Evite utilizar el equipo a menos de 2m2 de equipos que generen radiación electromagnética o equipos de resonancia magnética.
- No utilice objetos punzantes para operar los botones del panel de control.
- Antes de cada terapia, verifique cuidadosamente el dispositivo y sus accesorios (cables, conectores, electrodos, cabezas de ultrasonido, pantalla táctil) para cualquier daño mecánico, funcional u otro.
- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo.
- Evitar el uso de accesorios o insumos ajenos a los suministrados por la empresa FISIOLAB.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores.
- Evite exponer el dispositivo al contacto con agua, exceso de polvo o la humedad.
- Evite utilizar el dispositivo en espacios en donde estén presentes gases comburentes inflamables o vapores inflamables.
- Evitar cubrir los orificios de ventilación del equipo.
- Condiciones de trabajo: temperatura de 5°C a 30°C, humedad de 20% a 80%.
- Condiciones de almacenamiento: temperatura de -10°C a +50°C, humedad de 10% a 93%.



**VER EN TIENDA**



**CONTÁCTANOS**

FICHA FINAL

\*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD